

**Gedeon Richter France**  
103 Boulevard Haussmann  
75008 Paris

Paris, le 15/04/2024  
A l'intention des utilisatrices du stylo BEMFOLA

**Delphine Vachon**  
**Pharmacien Responsable**  
Email : [regulatory@gedeonrichter.fr](mailto:regulatory@gedeonrichter.fr)

**Objet : information sur une nouvelle aiguille du stylo d'injection Bemfola®**

Madame,

Dans le cadre de votre parcours de procréation médicalement assistée, votre médecin vous a prescrit Bemfola®, solution injectable en stylo prérempli.

Nous vous informons avoir modifié l'aiguille du stylo. Nous attirons votre attention sur l'évolution d'utilisation de cette nouvelle aiguille qui **devra être vissée** au stylo Bemfola®. L'ancienne aiguille se clipsait.


Actuellement les deux types d'aiguille cohabitent sur le marché. Par conséquent, nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation dans laquelle vous trouverez les caractéristiques du stylo et la manipulation correcte à effectuer. L'opercule du conditionnement de l'aiguille vous permettra de différencier facilement l'une de l'autre :



Opercule violet (Ypsomed) : aiguille à clipser



Opercule blanc et vert (Terumo) : aiguille à visser

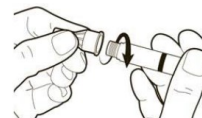

Si vous avez le moindre doute, nous vous recommandons d'écrire au service d'information médicale de Gedeon Richter France : [medinfo.fr@gedeonrichter.eu](mailto:medinfo.fr@gedeonrichter.eu)

En vous priant d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.



Delphine Vachon  
Pharmacien Responsable